


## Uniglidle Uniknæ

### Appendix A - IM femoral alignment teknik

#### Step A7(i). IM alignment

Den intramedullære alignmentguide er en mulighed for at sikre korrekt alignment af femur komponenten ved at anvende enten en ekstramedullær guide ELLER en intramedullær guidning.

Med knæet bøjet i ca. 45°, skal der laves et hul i lårbenets intramedullære kanal ved hjælp af 6mm bor. Hullet skal bores 1 cm foran det anteromediale hjørne af intercondylar notchen.

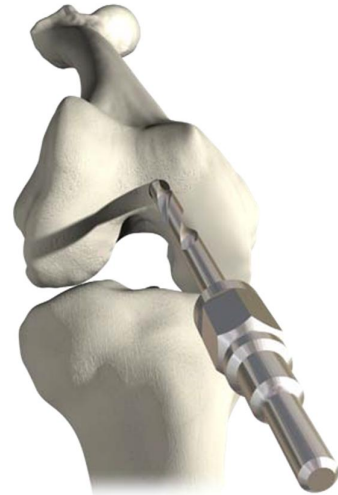

#### Step A7(ii). IM rod insertion

Indsæt den lange eller korte IM-stang i 6 mm hullet, så der er plads nok til femoral alignment guide. Knæet kan nu bøjes til 97° - vær opmærksom, da patellens midterkant grænser op til den intramedullære IM-stang.

Bemærk: IM-stangen kan også hjælpe som en retraktor til patella.



#### Step A7(iii). IM femoral alignment

Udskift tibialskabelonen, indsæt femur alignmentguiden med en blå spacer (slikkepind), som på EM-alignment indstilling. Den femorale alignment-guide kan nu introduceres og ligges på og flugte i midten af kondylen.

For at opnå 7° af valgus bør IM-stangen være parallel med den laterale side af femur alignmentguiden, når den ses ovenfra. Dette kan opnås ved intern og ekstern rotation af tibia.

Ved at justere knæets flexion, får man femur guiden til at være parallelt med IM-stangen, når den ses fra siden

